










PLAN D'URGENCE OCULAIRE

Action des substances toxiques	Solution de lavage recommandée	Application	Poursuivre jusqu'à l'intervention du médecin
Corps étrangers par ex. poussière, saleté, copeaux de métal ou de bois	 ACTIOMEDIC® Solution de chlorure de sodium 0,9 %	Lavez les yeux jusqu'à ce que les corps étrangers soient éliminés.	 Poursuivez le lavage oculaire avec ACTIOMEDIC® Solution de chlorure de sodium 0,9 %
Brûlures à l'acide	 Solution de lavage oculaire avec tampon phosphate 4,9 % BioPhos®74	Lavez les yeux avec BioPhos®74 pendant environ 2,5 minutes jusqu'à ce que le flacon soit vide.	 Poursuivez le lavage oculaire avec ACTIOMEDIC® Solution de chlorure de sodium 0,9 %
Brûlures alcalines sauf substances contenant du calcium, par ex. chaux et ciment	 Solution de lavage oculaire avec tampon phosphate 4,9 % BioPhos®74	Lavez les yeux avec BioPhos®74 pendant environ 2,5 minutes jusqu'à ce que le flacon soit vide.	 Poursuivez le lavage oculaire avec ACTIOMEDIC® Solution de chlorure de sodium 0,9 %
Autres lésions par ex. solvants et huiles, sauf substances contenant de l'argent	 ACTIOMEDIC® Solution de chlorure de sodium 0,9 %	Lavez les yeux jusqu'à ce que la sensation désagréable disparaisse.	 Poursuivez le lavage oculaire avec ACTIOMEDIC® Solution de chlorure de sodium 0,9 %




Retirez le flacon de la station oculaire ou de la mallette de lavage oculaire.

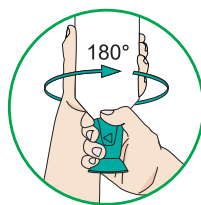

Tournez l'ocillère de 180° dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le dispositif d'inviolabilité cède.



Renversez la tête en arrière et lavez l'œil avec un flux constant.

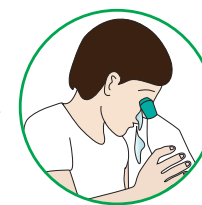









Penchez-vous vers l'avant avant de retirer le flacon pour ne pas mouiller vos vêtements.




IMPORTANT: Rincez l'œil indépendamment de la nature de la lésion, toujours avec un flux doux constant et tout en gardant l'œil grand ouvert. Appuyez légèrement sur le flacon pour le lavage. Consultez immédiate-


ment un médecin pour toute lésion oculaire / saleté dans les yeux. Poursuivez impérativement le lavage avec une solution de chlorure de sodium (0,9 %) jusqu'à l'intervention du médecin.

OOG-NOODPLAN

Inwerking door schadelijke stoffen	Aanbevolen spoeloplossing	Toepassing	Voortzetten tot aan medische behandeling
Vreemde voorwerpen bijv. stof, vuil, metaal- en houtsplinters	 ACTIOMEDIC® Steriele natriumchlorideoplossing 0,9 %	Ogen zo lang spoelen tot de vreemde voorwerpen eruit zijn gespoeld.	 ACTIOMEDIC® Steriele natriumchlorideoplossing 0,9 %
Zuurletsels	 Fosfaatgebufferde oogspoeloplossing 4,9 % BioPhos®74	Ogen ca. 2,5 minuut spoelen met BioPhos®74 tot de fles leeg is.	 ACTIOMEDIC® Steriele natriumchlorideoplossing 0,9 %
Alkalische letsels uitgezonderd calciumhoudende substanties, bijv. kalk en cement	 Fosfaatgebufferde oogspoeloplossing 4,9 % BioPhos®74	Ogen ca. 2,5 minuut spoelen met BioPhos®74 tot de fles leeg is.	 ACTIOMEDIC® Steriele natriumchlorideoplossing 0,9 %
Overig letsel bijv. oplosmiddelen en oliën, behalve substanties die zilver bevatten	 ACTIOMEDIC® Steriele natriumchlorideoplossing 0,9 %	Ogen zo lang spoelen tot het onaangename gevoel weg is.	 ACTIOMEDIC® Steriele natriumchlorideoplossing 0,9 %

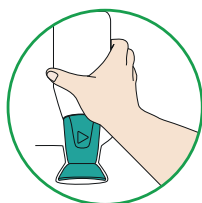

Haal de fles uit het oogspoelstation / de oogspoelkoffer.

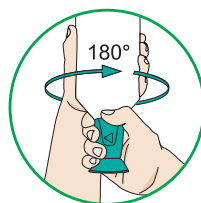

Draai de oogschaal 180° in de richting van de pijl tot de verzegeling breekt.



Leg het hoofd in de nek en spoel het oog gelijkmatig.



Buig voordat u de fles van uw oog haalt naar voor om te voorkomen dat uw kleding nat wordt.



BELANGRIJK: Spoel het oog ongeacht het soort verwonding steeds met een gelijkmatige zachte straal en houd het daarbij wijd open. Oefen tijdens het spoelen lichte druk uit op de fles.

Bij elk oogletsel / -vervuiling moet onmiddellijk medisch advies worden ingewonnen! Zet het spoelen hoe dan ook voort met natriumchlorideoplossing (0,9 %) tot er een arts is geraadpleegd.